




KIT DE IRRIGAÇÃO
INSTRUÇÃO DE USO

Passo 1:

Abra a embalagem estéril do Kit de Irrigação e coloque-o sobre o campo estéril.

Passo 2:

Conecte a ponta da mangueira de Silicone na parte metálica do conector de irrigação da peça de mão.

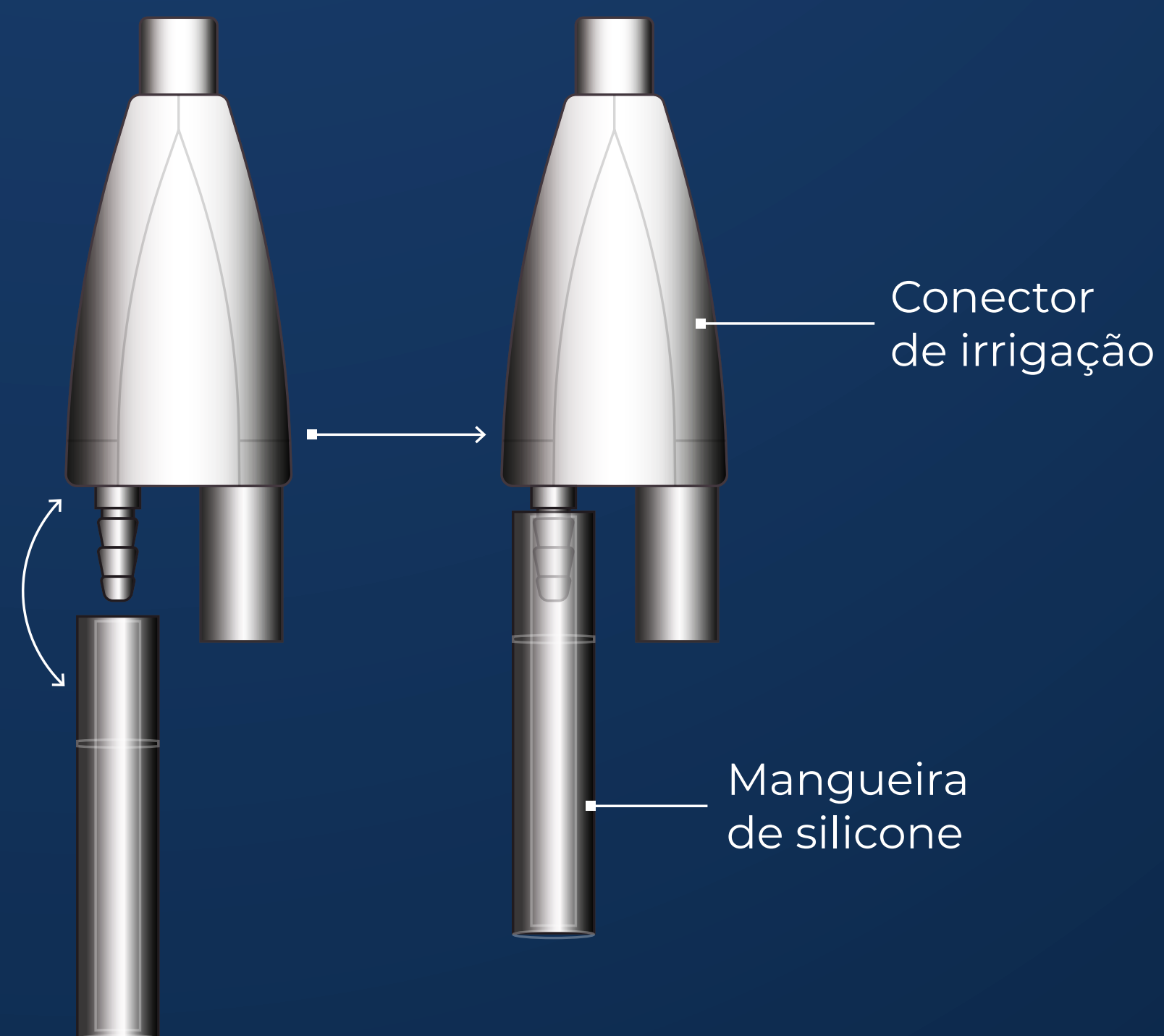



Passo 3:

Conecte o conector de irrigação da peça de mão, com a mangueira encaixada, no Motor.

Passo 4:

Abra a tampa do cassete da bomba peristáltica instalada na parte traseira do Motor.



Passo 5: Coloque a Mangueira de Silicone sobre os roletes do cassete, puxando as extremidades para baixo.

Passo 6: Feche a tampa da bomba do cassete, até que a mesma fique travada.

Passo 7: Coloque a bolsa de soro no suporte.

Passo 8: Espete a ponteira de inox na bolsa de soro.

Passo 9: Proceda com a irrigação.

KIT DE IRRIGAÇÃO
INSTRUÇÃO DE USO

DETALHES DO PRODUTO

Nome da empresa: BYPRO Medical
Indústria e Comércio de Materiais
Médicos e Cirúrgicos LTDA.

CNPJ: 45.142.465/0001-15

Autorização: 8.25751-7 (H09279L83W23)

Produto: Kit de Irrigação BYPRO

Modelo: Produto Médico - Kit de
Irrigação BYPRO

Registro: 82575170001

Processo: 25351.530049/2023-38

Classificação de Risco: I - Baixo Risco

NOTA

o material deve ser retirado
de sua embalagem apenas
no momento da cirurgia e
em ambiente estéril.





sac@bypromedical.com.br
+55 (11) 2424.8989
bypromedical.com.br |   @bypromedical

Registro: 82575170001
Processo: 25351.530049/2023-38
Resp. Técnica: Denise Massagardi - **CRF:** 75311/SP
REV.00